

Consejos para la resolución de problemas

Problema	Qué hacer
El audífono no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Encienda el audífono cerrando completamente la tapa del portapilas (capítulo 3)• Inserte la pila correctamente (capítulo 4)• Cambie la pila (capítulo 4)• Limpie el auricular/sistema de acoplamiento acústico (capítulo 12)
El audífono pita	<ul style="list-style-type: none">• Inserte correctamente el audífono (capítulo 5)
El audífono tiene el volumen demasiado bajo o el sonido está distorsionado	<ul style="list-style-type: none">• Cambie la pila (capítulo 4)• Aumente el volumen en caso de que se disponga de control de volumen (capítulo 7)• Reduzca el volumen en caso de que se disponga de control de volumen (capítulo 7)• Limpie el auricular/sistema de acoplamiento acústico (capítulo 12)• Póngase en contacto con su audiólogo
El audífono emite dos pitidos	<ul style="list-style-type: none">• Cambie la pila en los próximos 30 minutos (capítulo 4)
El teléfono no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Abra y cierre la tapa del portapilas (capítulo 3)• Empareje el audífono con el teléfono (capítulo 9)

Si el problema continúa, póngase en contacto con su audioprotesista para obtener ayuda.

Aplicación para controlar los audífonos


Cómo realizar la descarga:

1. Visite la App Store® o Google Play™
2. Busque la aplicación Easy Line Remote
3. Descargue e instale la aplicación en su smartphone
4. Siga las instrucciones para emparejar los audífonos con su teléfono



Funciones:

- Ajustar el volumen del audífono (izquierdo/derecho ajustables por separado)
- Cambio del programa manual
- Equilibrio del volumen del dispositivo de transmisión externo
- Estadísticas de uso
- Preguntas frecuentes

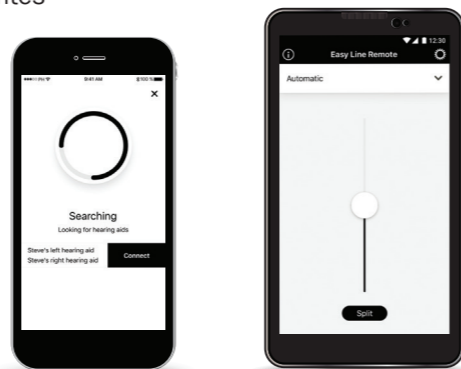

Antes de empezar a usar los audífonos

Se recomienda encarecidamente leer las instrucciones de uso completas, específicamente sobre:

Cuidado y mantenimiento (capítulo 12)

Lea más detalles sobre los audífonos que son resistentes al agua y al polvo bajo determinadas condiciones.

Información importante relativa a la seguridad (capítulo 18)

Obtenga información importante para conseguir el mejor rendimiento y uso seguro.

Solución de problemas (capítulo 17)

Asistencia útil y posibles consejos en caso de que los audífonos no funcionen bien.

Obtenga más información y asistencia, incluida la compatibilidad con Bluetooth, en www.KS9userportal.com



Fabricante:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suiza



029-0771-06/V2.00/2019-09/ao © 2019 Sonova AG All rights reserved



KIRKLAND
Signature

Audífonos
DIGITALES




9.0
9.0 T

Guía de inicio rápido


Esta guía contiene información útil adicional y consejos, así como instrucciones en profundidad para lograr un uso óptimo de sus audífonos. No sustituye la lectura de las instrucciones de uso incluidas en el kit.

Inicio rápido: poner y quitar los audífonos

1. Identificación de los audífonos izquierdo/derecho (marca azul para el izquierdo, marca roja para el derecho):

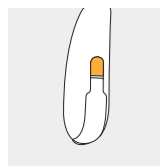

Indicador en la parte trasera del audífono.

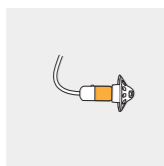


Indicador en el auricular.

2. Colocar la pila en el portapilas y encenderlo:




Retire el plástico protector de la pila nueva y espere 2 minutos.

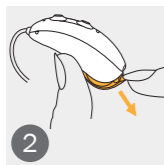

Abrir la tapa del portapilas.



Coloque la pila en el portapilas con el símbolo "+" hacia arriba.

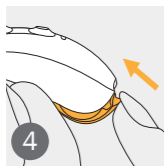


Encienda el audífono cerrando la tapa del portapilas.


3. Colocación y funcionamiento del audífono




Colóquese el audífono detrás de la oreja.

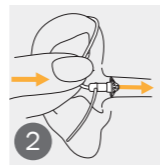

Inserte el auricular en el conducto auditivo.

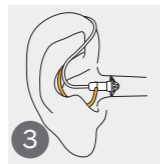


Si hay una retención conectada al auricular, introdúzcala en la cavidad de la oreja para fijar el audífono.

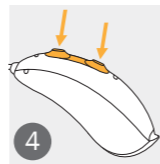

Cambiar el volumen, programa y aceptar/rechazar llamadas.

4. Retirar y apagar el audífono:

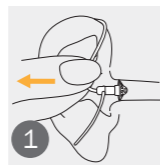

Tire suavemente de la curva del tubo y retire el audífono de detrás de la oreja.



Apague el audífono abriendo la tapa del portapilas.

Disfrute de una conectividad sencilla con todos los teléfonos con Bluetooth® para realizar llamadas con manos libres, reproducir música, libros electrónicos, etc.

Paso 1: Emparejamiento inicial



A. En su dispositivo (normalmente un smartphone), asegúrese de que está activada la tecnología inalámbrica de Bluetooth. Busque dispositivos con Bluetooth activado en el menú de configuración.

B. Encienda ambos audífonos. Ahora dispone de tres minutos para emparejar sus audífonos con su dispositivo.

C. Su dispositivo muestra una lista de dispositivos compatibles con Bluetooth encontrados. Seleccione el audífono de la lista para emparejar simultáneamente ambos audífonos. Un bip confirmará que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Los audífonos se pueden conectar a los smartphones iPhone® y Android™.

Para obtener más información sobre las instrucciones de emparejamiento, visite la página: www.KS9userportal.com

Además, consulte el capítulo 9 de las instrucciones de uso.

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Paso 2: Cómo realizar llamadas de teléfono con manos libres

Hacer una llamada: Marque el número de teléfono y pulse el botón de llamada. Escuchará el tono de marcación a través de sus audífonos. Los audífonos recogen su voz a través de sus propios micrófonos.



Aceptar una llamada: Pulse brevemente en la parte superior o inferior del botón multifunción del audífono (menos de dos segundos) o directamente en su teléfono.



Finalizar o rechazar una llamada: Pulse largamente en la parte superior o inferior del botón multifunción del audífono (menos de dos segundos) o directamente en su teléfono.