故障排除技巧

問題	如何解決
助聽器無功能	 透過完全關閉電池門來開啟助聽器 (第3章) 正確放置電池(第4章) 更換電池(第4章) 清潔喇叭開口處/耳塞(第12章)
助聽器發出嘰 嘰音	• 正確配戴助聽器(第5章)
助聽器聲音 不夠大或聲音 失真	 更換電池(第4章) 若音量控制可用,則提高音量(第7章) 若音量控制可用,則降低音量(第7章) 清潔喇叭開口處/耳塞(第12章) 聯絡您的聽力保健專家
助聽器發出兩聲 嗶聲	• 在 30 分鐘內更換電池 (第 4 章)
手機無法運作	打開並再次關閉電池門(第3章)將助聽器與手機配對(第9章)
若問題仍然存在,請聯絡聽力保健專家,尋求協助。	

遙控助聽器的應用程式

如何下載:

- 1. 至 App Store® 或 Google Play™
- 2. 搜尋 Easy Line Remote
- 3. 使用智慧型手機下載並安裝應用程式
- 4. 按照指示將助聽器與手機配對

Download on the App Store Get IT ON Google Play

功能:

- 調整助聽器音量(左側/右側可單獨調整)
- 手動程式變更
- 外部串流裝置的音量平衡
- 使用統計資訊
- 常見問題解答





開始使用助聽器前

我們強烈建議閱讀完整使用手冊,尤其是以下方面:

照顧及維護(第12章)

閱讀以了解在特定條件下抗水及防塵的助聽器之更多訊息。

重要安全資訊(第18章)

閱讀有關最佳性能和安全使用的重要資訊。

故障排除(第17章)

助聽器未正常運作時有用的支援和可能的解決方法。

在 www.KS9userportal.com 上查找更多資訊和支援,包括藍 牙相容性





動 助 聽器



快速入門說明

此手冊其中包含其他有用的資訊和技巧, 以及建議使用助聽器的詳細說明。 此說明並不取代使用手冊的閱讀。



Manufacturer:

Sonova AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland





快速入門: 配戴和取下助聽器

1. 為助聽器標記左右側(藍色標誌為左耳,紅色標誌為右耳):



標誌於助聽 器背面。



標誌於 喇叭上。

2.將電池放入電池門並將其開啟:




撕下新電池的 貼紙並等待2 分鐘。



打開電池門。



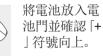

池門並確認 [+



透過關閉電 池門來開啟 助聽器。

3.配戴並操作助聽器:



將助聽器放於 耳後。



將耳塞放 置耳道。





變更音量, 程式和接聽/ 拒絕電話。

4.取下並關閉助聽器:



拉住管線彎 曲處,並將 助聽器從耳後 取下。



透過打開電池 門來關閉助聽 器。

可以輕鬆連接所有 Bluetooth® 手機來進行免持通話,音樂、電子書串流等。

第 1 步: 初次配對



- A. 在裝置(例如手機)上,確保藍牙無線技術已經開啟。在連接 設定功能表中搜尋藍牙裝置。
- B. 開啟兩個助聽器。您現在有 3 分鐘的時間將助聽器與裝置進 行配對。
- C. 藍牙裝置清單將顯示您的裝置。從清單中選取助聽器來同時 配對兩個助聽器。嗶聲確認配對成功。

助聽器可以連接至 iPhone® 和 Android™ 智慧型手機。

有關配對指示說明的更多資訊,移至: www.KS9userportal.com

此外, 請查閱使用手冊的第9章。

Bluetooth® 文字標記和標誌是歸 Bluetooth SIG. Inc. 所有的註冊商標。 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。 Android、Google Play 和 Google Play 標誌是 Google LLC 的商標。

第 2 步: 如何操作免持通話

進行通話: 輸入電話號碼並按下撥號按鈕。 您會透過助聽 器聽到撥號音。您的助聽器將透過其自有的麥克風來收取 您的聲音。



接聽電話: 短按助聽器多 功能按鈕的上方或下方(少於 2秒)或直接按手機。



結束和拒絕通話:長按助聽器 多功能按鈕的上方或下方(多 於2秒)或直接按手機